



カナダ生まれの新リネン

Comfort Linen™

摩擦を圧倒的に軽減！ 動きを促す体位変換器 プレベンティブシート

特許
取得済

トライボロジー※の技術を応用

カナダの理学療法士が開発したシートです

※トライボロジー(摩擦学): 相互運動を行う2つの物体の接触面に関する研究と技術

介護保険レンタル対応

体位
変換

シート中央のブルーの部分に摩擦を軽減する特殊な生地を使用し体位変換をサポートします。

床ずれ
予防

床ずれ発生の原因になる応力(ズレ力や引っ張り力)を軽減します。

腰痛
予防

介助者の身体的負担・介助量を軽減、腰痛を予防し医療費の削減と離職率の軽減へと繋がります。

自立
支援

高齢者や難病患者の残存機能を活かし、寝返りや体動等の自立支援をサポートします。

プレベンティブシートの特長

高い通気性

寝具に求められている通気性 $600\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hrs}$ を大幅に超える $918\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hrs}$ を実現。


ノンアイロン

シワになりにくい素材なので面倒なアイロンがけも不要です。

※アイロンを使用される場合、アイロン温度 130°C まで

熱湯による消毒が可能

ガイドラインにある「 80°C 以上の熱湯に10分以上浸す」をクリア。(MAX 90°C)

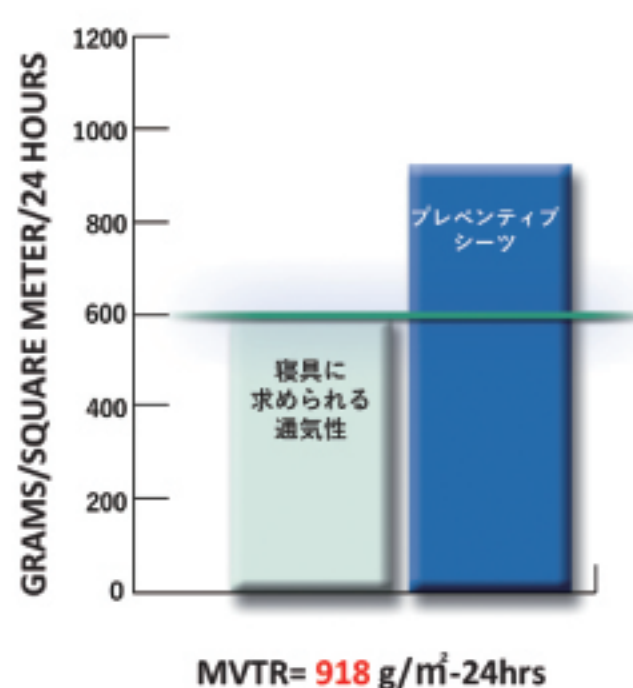

静電気の予防

不快な静電気を予防する為カーボン繊維を編み込んでいます。

拡大図

幅広いマットレスに対応

プレベンティブシート1枚で幅広いマットレスに対応します。

ボックスシートで交換も簡単

一人でもシート交換がスムーズに行えます。

滑り落ち防止

ベッドサイドは綿素材を採用することで、端座位時の滑り落ちを防止します。



トライボロジー(摩擦学)を応用した素材

ベッド上の摩擦を軽減し寝返り、体動、移動・移乗をサポートします。タテ・ヨコ・ナナメ全方向へのスライドに対応しています。

踏ん張りが効く

足元は膝を立てた時に足底が滑らないように綿素材を使用しています。

プレベンティブシート

対応サイズ:

長さ191cmまで 幅100cmまで 高さ25cmまで

材質: ポリエステル、カーボン、綿

定価: ¥10,000 (税抜)

TAIS: 01622 - 000006

※商品の仕様等は予告無く変更する場合があります。



介護保険レンタル対応

防水機能付き体位変換器

タフ スライディングパッド

プレベンティブシートと併用することで摩擦を大幅に軽減する体位変換器です。
防水シートを使用すると動きが妨げられるという概念を覆します。

タフ スライディングパッドの特長

● 左右のハンドル

体位変換をより容易に行うことができるよう、左右に持ち手を採用しました。



● マジックベルト

側臥位中のケアが両手で確実に行えるよう、マジックベルトを付属しています。



● 吸水・防水・スライド

1ℓの水分も余裕で吸水・防水します。
裏面はスライド素材を使用。

※効果を得るにはプレベンティブシートとペアでお使い下さい。

● 耐久性

耐久性抜群の生地を使用しているため、
繰り返し洗濯してご使用頂けます。



防水機能付き体位変換器 タフ スライディングパッド

サイズ: 870×870×2.8mm

材質: ポリエステル、レーヨン

定価: 〈1枚〉 ¥6,000(税抜)マジックベルト付き TAIS:01622 - 000007

〈2枚〉 ¥12,000(税抜)マジックベルト付き TAIS:01622 - 000008

※商品の仕様等は予告無く変更する場合があります。

※全介助者の場合は上半身・下半身にそれぞれ1枚ずつ使用して下さい。(2枚1組での販売もあります。)

※タフ スライディングパッドには向きがあります。ハンドルがベッドの左右になる様に配置して下さい。(ハンドルを上下にすると滑らなくなります。)

開発者

こちらから使用体験を動画にて
ご覧いただけます。



開発者のナンシーはプリティッシュ・コロンビア州 内陸保健局 安全衛生アドバイザー スライダー・シート・システム プロジェクト・マネージャー 等、40年以上に及ぶ理学療法士としての経験から、ベッド上の体位変換を容易にする必要性を認識し商品を開発しました。

〈輸入総代理店〉

(有)ホームケア渡部建築

〒683-0104 鳥取県米子市大崎290-1

TEL: 0859-28-8487 FAX: 0859-28-8630

MAIL: homecare-k@sea.chukai.ne.jp

HP: www.homecarewatanabe.com